

ワンタッチアクロ

【警告】

- 1.採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
- 2.使用後の穿刺針には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
- 3.穿刺針を本品に装着したまま放置しないでください。[誤って穿刺される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

穿刺針は再使用禁止。一度使用した穿刺針は再使用せず、必ず新しい穿刺針を使用してください。[感染の危険性があります。]


【形状・構造及び原理等】

本品は、本体、穿刺ボタン、確認窓、穿刺深度表示、深度調節ダイヤル、取りはずしボタンで構成されます。

原理: 穿刺ボタンを押すことで、本体内部のスプリングにより穿刺針を突出させ穿刺する。

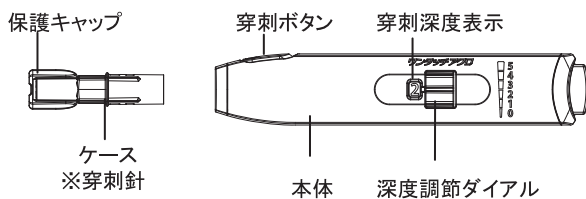

< 穿刺針取り付け時 >

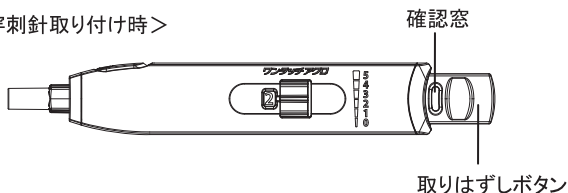

※組み合わせ医療機器(別売)


販売名 : ワンタッチアクロラセット
医療機器認証番号 : 227AFBZX00092000

【使用目的又は効果】


本品は、血糖値測定時の血液を採取するための穿刺器具で、専用の穿刺針を装着して使用します。

【使用方法等】


1. 穿刺針の取り付け

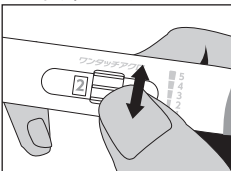


- 1) 深度調節ダイヤルを回して、穿刺深度を調節します。穿刺深度は6段階あります。穿刺深度: 0/浅い~5/深い

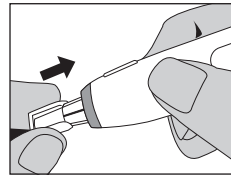

- 2) 保護キャップをもって、穿刺針を本品に取り付けてください。
注意: 穿刺ボタンを押しながら、穿刺針を取り付けると、穿刺針が正常に取り付けられません。

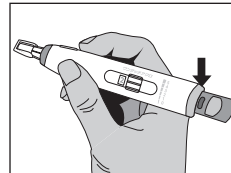


- 3) 穿刺針の取り付けが完了すると確認窓がオレンジ色になります。

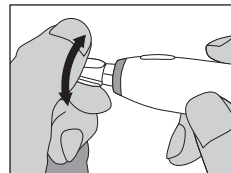


- 4) 保護キャップをねじって取りはずしてください。取りはずした保護キャップはすぐに廃棄してください。
注意: 保護キャップを取りはずす前に、誤って穿刺ボタンを押した場合は、再度、保護キャップをカチッと音がするまで押し込んでください。


2. 採血方法

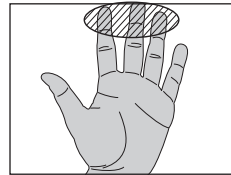

- 1) 採血部位を消毒綿を使って消毒し、十分に乾燥させてください。

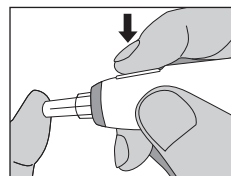


- 2) ケースの先端を採血部位に押し当てて固定し、穿刺ボタンを押してください。

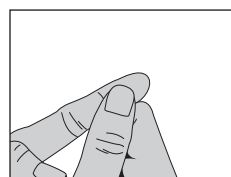

- 3) 穿刺後、指先を軽くマッサージすると血液を採取しやすくなります。このとき採血部位を無理に押さえるなどして血液を絞りださないでください。

3. 使用済み穿刺針の取りはずし方法

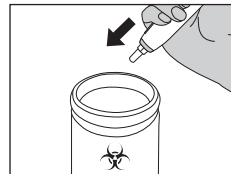

- 廃棄用の容器へ向けて、取りはずしボタンを押してください。穿刺針がはずれます。