

取扱説明書

重要事項:ご使用前に本取扱説明書および測定器の添付文書および取扱説明書をお読みください。

使用目的

本コントロール溶液は測定器とセンサーが適切に機能し、検査が正しく実施されていることを確認するために、ワンタッチベリオプロプラス測定器およびワンタッチベリオセンサー医科向と組み合わせて使用します。

概説

- 本コントロール溶液は、ワンタッチベリオセンサー医科向と反応する既知量のグルコースを含有する溶液です。
- コントロール溶液の測定結果が、検査に使用されるコントロール溶液の容器ラベルに印字されている許容範囲に入っていることを確認してください。
- 専用のワンタッチベリオコントロール溶液を使用してください。どのレベルのコントロール溶液を使用しても構いません。

△ 警告: 測定器と関連品はお子様の手の届かないところに保管してください。小さな部品は喉をつまらせ、窒息させる危険があります。

以下の場合にコントロールテストを行ってください。

- 新しいセンサーの容器を開けて使用するとき。
- 測定器やセンサーが正しく機能していないと思われるとき。
- 予期せぬ測定結果が繰り返し出るとと思われるとき。
- 測定器を落とすなどして、測定器に衝撃を与えた場合、または壊したと思われるとき。

試験手順

コントロールテストの実施方法に関する説明については、測定器の取扱説明書をお読みください。

組成

コントロール溶液は、粘度調整剤、保存料、色素、緩衝液、および水に溶解したグルコース（コントロール溶液（低濃度）0.040%、コントロール溶液（中濃度）0.12%、コントロール溶液（高濃度）0.35%）を含有しています。容器には約75回分の溶液が入っています。

重要な注意事項

- コントロール溶液が汚染されると、正確な測定結果が得られない可能性があります。このリスクを軽減するために、コントロール溶液の最初の一滴は捨て、容器の先端とキャップを清潔なティッシュペーパーまたは布できれいに拭いてください。
- 使用期限は容器に印字されています。
- 処分日は、コントロール溶液の容器を最初に開封した日から3ヵ月です。新しい容器を開封するときは、ラベルに処分日を記入してください。
- 使用期限または処分日のいずれかが過ぎたコントロール溶液は使用しないでください。
- 測定器やセンサー、コントロール溶液がそれぞれ異なる温度環境で保管されていた場合、室温に置き、しばらくたってから測定を行ってください。

AW 06771101A



ONETOUCH[®]
Verio[™]
ワンタッチベリオプロプラス専用
コントロール溶液（低濃度）
コントロール溶液（中濃度）
コントロール溶液（高濃度）

△ 警告:

- ・コントロール溶液を吸い込んだり、飲み込んだりしないでください。
- ・コントロール溶液は皮膚や眼を刺激するおそれがあるため、直接触れないでください。

保管および取扱上の注意

使用後はただちに容器のキャップをしっかりと締めてください。高温多湿を避け、30°C以下の場所でコントロール溶液を保管してください。**冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。**

結果

コントロールテストの結果が、テストに使用されるコントロール溶液の容器ラベルに印字された許容範囲内であることを確認してください。

ワンタッチベリオプロプラス専用コントロール溶液 (低濃度) (緑キャップ):

25~49 mg/dL

ワンタッチベリオプロプラス専用コントロール溶液 (中濃度) (青キャップ):

102~138 mg/dL

ワンタッチベリオプロプラス専用コントロール溶液 (高濃度) (赤キャップ):

298~403 mg/dL

次のような原因によりコントロールテストが許容範囲からはずれることがあります。

- ・測定器の取扱説明書に記載されているコントロールテストの実施方法に従って正しく操作しなかったとき。
- ・コントロール溶液が汚染されている、使用期限または処分日を過ぎているとき。
- ・センサーまたはセンサーの容器に損傷がある、使用期限または処分日を過ぎているとき。
- ・コントロールテスト実施時、測定器、センサー、またはコントロール溶液が動作温度範囲 (6~44°C) からはずれているとき。
- ・測定器に問題があるとき。

結果が許容範囲からはずれた場合は、新しいセンサーを使って再度コントロールテストを実施してください。

△ 警告:

- ・コントロールテストの結果が、繰り返し許容範囲からはずれる場合は、その測定器、センサーやコントロール溶液の使用を中止して、ワンタッチコールセンター 0120-113-903 (24時間受付、無料通話) にお問い合わせください。

性能

測定器の取扱説明書を参照してください。

包装単位

各濃度 (低濃度、中濃度、高濃度) 1本入

記号に関しては取扱説明書をご参照ください。

輸入・発売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

東京都千代田区西神田3丁目5番2号

(米国製)

お問い合わせ先:ワンタッチコールセンター

0120-113-903 (24時間受付、無料通話)

