

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットMD

【この製品は？】

販売名	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットMD
承認番号	30400BZX00112000
一般的名称	吸収性局所止血材
製品情報	サージセルコットン型(綿型) 注文番号：1961/1箱10枚入り 1枚：2.5cm×5.1cm (1インチ×2インチ) 注文番号：1962/1箱10枚入り 1枚：5.1cm×10.2cm (2インチ×4インチ) 注文番号：1963/1箱10枚入り 1枚：10.2cm×10.2cm (4インチ×4インチ) 
原理	血液を吸収して膨潤し、褐色又は黒色のゼラチン状の塊となって凝血物の形成を促進し、局所出血の止血補助材としての効果を発揮する。
原材料	酸化再生セルロース

患者向けガイドについて

患者向けガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医療機器の正しい理解と、重大な有害事象の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。したがって、この医療機器を使用するときに特に知っていただきたいことを、添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医療機器の使用による重大な有害事象と考えられる場合には、ただちに医師に相談してください。ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医療機器に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/>に添付文書情報が掲載されています。

【この製品の使用目的等は？】

手術や外来処置をしているときに、糸でしばるなどのいつもの方法では出血が止まらない、またはその方法が使えないときに、出血を止めるために補助として使うものです。オスラー病などでよく鼻出血が出る方に対しては、病院、医院の外来や自宅などで使われることがあります。

【この製品を患者さんが使う前に、確認すべきことは？】

- 必ず医師の処方を受けて、この製品を使用してください。処方を受けていない方への転用などは行わないでください。
- 医師の指示および指導に従って使用してください。また、この製品を使っても出血が止まらないときは、すぐに病院へ連絡してください。
- 患者さんは以下の点について十分理解できるまで説明を受けてください。理解したことが確認されてから使用が開始されます。

この製品は、出血が止まった後に、余分な部分を可能な限り取りのぞいてください。

そのままにしておくと体に合わず異物反応が出る場合があります。そのほかにも、使ったところがひりひりする、痛みが出る、くしゃみが出るなどの症状があらわれることがあります。

※この製品を使ったあとに、気になる症状が出た場合、または出血が止まらない場合は、すぐに医師に連絡してください。

【この製品の使い方は？】

事前準備

製品を開封し、薄く割くことでよりこの製品を適切なサイズ、形状に整えてください。



鼻出血時の使用方法（出血量により推奨使用方法が異なります）

● 少量の鼻出血の場合

薄く割いたものを使用し、ソフトに出血している鼻の中に当ててください。使用の際には一片ずつ使用し、必要に応じて追加してください。

● 中等量から大量の鼻出血の場合

出血している側の鼻の中に、出血が止まるまでしっかり当て、強すぎない適度な力で鼻翼を圧迫してください。

止血後の対応

出血が止まったあとは、余分な部分はできるだけ取りのぞきます。

鼻粘膜に刺激を与えないようにやさしく除去してください。

【この製品の使用中に気をつけなければならないことは？】

- この製品は、濡らさずにそのまま使うことで、出血を止める効果が得られます。水や食塩水で濡らして使わないでください。
- 使う量は必要な分だけにし、薄く割いたものを出血が止まるまで追加してください。
- 鼻出血に使う場合、この製品を吸いこんでしまわないように注意してください。
- 鼻の中に入れて使うときは、入れすぎないでください。
- 高温多湿、直射日光を避けて、室温で保管してください。
- 包装を開けたあとに使わなかった分は、再び使わずに捨ててください。
- 使い終わった製品は、地域によっては感染の心配があるごみとして扱われることがあります。捨てるときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

有害事象は？

特にご注意いただきたい重大な有害事象と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。

このような場合には、ただちに医師に相談してください。

また、出血が止まらない場合にも、ただちに医師に相談してください。

重大な有害事象	主な自覚症状
麻痺 まひ	力が入らない、しびれを感じる
異物反応 いぶつはんのう	使った場所が赤くなる、はれる、熱をもつ、違和感がある
疼痛 とうつう	使った場所やその周りが痛む、ズキズキする

【この製品についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、有害事象などのより詳しい質問がある場合は、医師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

電話：03-6808-1826

製造販売会社：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

高度管理医療機器 販売名：サージセル・アブソーバブル・ヘモスタットMD

承認番号：30400BZX00112000